

抗原検査キット

15分
で検出!



1箱 10セット入り

1セットあたり

¥3,800 +税
(税込) ¥4,180

新型コロナウイルスに感染すると体内で生成されるウイルス特有のタンパク質(抗原)を検出することができます。万が一、体調に変化があった場合に…。

自宅等で新型コロナウイルス感染の有無の

判断材料の一つとして確認することができます。


商品名	COVID-19 抗原検査キット 10セット入
商品コード	121-528
販売価格	税抜 ¥38,000 (税込 ¥41,800)

※ご注文いただいてからお取り寄せしますので、納期をいただく商品です。なお、キャンセル・返品はお受けできませんのでご注意ください。

製品概要



1箱 10セット入り

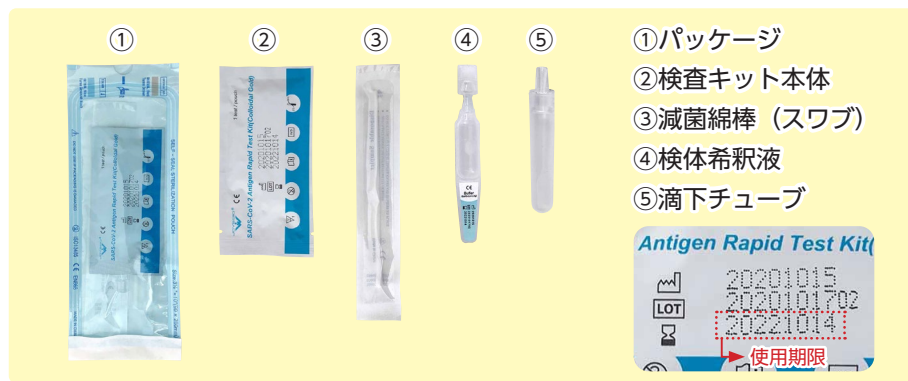

臨床試験データで高い検出率評価を実現






本検査キットは、2020年10月～11月にイタリアにて行われた190サンプルの臨床分析によると、PCR検査キットと比較して、検出感度は98.72%、特異度は97.32%と高い検出率評価を実現しています。

試薬試験結果	PCR 検査		合計
	陽性	陰性	
陽性	77	3	80
陰性	1	109	110
合計	78	112	190

研究用試薬

- 販売先：主に企業や個人
- 使用用途：検査キットの結果により、企業や個人のコロナウイルス対策に対する1つの判断材料として
- 実施可能な場所：指定なし
- 販売に必要な認可：不必要 雑貨扱い
- 販売免許：必要なし
- 該当製品：抗体検査キット、抗原検査キット等（薬事承認なし）

商品名	品番	適用サンプル	保管	使用期限
COVID-19 抗原検査 キット	JOYSBIO- covid-19 -AGTK	鼻腔ぬぐい液 (鼻腔スワブ)	2～30℃	製造日から 24ヶ月

海外での認証		
CE-IVD 体外診断用医療 機器指令  EU CE Certification	FDA 英国食品医薬品局  Emergency Use Authorization	WHO 世界保健機構  WHO

※本検査キットは新型コロナウイルス感染を確定診断させるものではありません。

使用上の制限

1. 本製品は定性検査のみ適用されます。
2. 新型コロナウイルスの感染について、本製品の検査結果だけではなく、他の方法による検査結果とあわせて総合的に判断して下さい。
本製品は新型コロナウイルスと思われる症状が発症してから5日以内に利用して下さい。
3. 5日目以降になると、検査結果が正しく現れないことがあります。

●本製品の使用により発生した損害及び損失について、弊社では責任を負いません。

検査手順

1 検体採取の準備

パッケージを開封し、中身を全て取り出します。検体希釈液の入った容器の先端部分をねじって取り外し、中にある検体希釈液を全てチューブの中に移します。



2 検体を採取します (鼻腔ぬぐい液)



滅菌綿棒を鼻腔内(綿棒の先端が鼻孔入口部から奥に2～3cm程度)に差し込み、ゆっくり5回程度回転させます。同手順を両方の鼻孔で行います。

※粘膜の付着を必ず確認してください。

※この行為は必ずご自身で行ってください。

3 検体を抽出します

綿棒を抜き、チューブの中に差し込み、液体の中で20秒以上綿棒を上下に動かします。その後、綿棒をチューブの底に押し当てて5回程度回し、チューブの外側から絞りながら綿棒を抜き取ります。




※中身がこぼれない様に注意して下さい。

4 検査キットに検体を滴下します

検体が入ったチューブにノズルキャップをしっかりと差し込みます。抗原検査キット本体を清潔で平らな場所に設置されていることを確認し、チューブから検体をサンプル注入口に3滴程度滴下します。



5 検査結果を確認します (検体滴下後 15～20分)

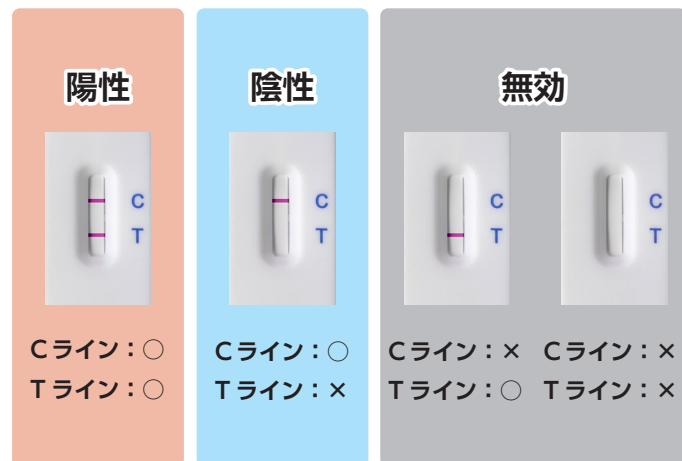

※検体滴下後、20分程度の結果で判定して下さい。

※『C』にラインが現れない場合は、新しい検査キットで再度検査して下さい。



smartoffice® カスタマーデスク
TEL: 0120-956-707

【受付時間】月曜から土曜(祝日を除く)午前9時～午後6時



▶ Webでのご注文はこちらからどうぞ

<https://www.smartoffice.jp>



▶ FAXでのご注文はこちらからどうぞ FAXでのご注文はスマートオフィス
カタログ裏面の専用オーダーシート
をご利用ください。

0120-956-616